

Følgeseddel

til

Indsamling af prøver til IgG oligoklonale bånd-analyse.

Prøvedato (spinal): klokken: evt. glas-nr:
Prøvedato (plasma): klokken:

Cpr. nr og patient navn:
(Brug gerne label)

Svarmodtager afdeling:

Del-AE nr (skal påføres af afdelinger på Rigshospitalet! – hvem betaler?):

EAN-nr. (rekvirentens offentlige faktureringsnr. som skal påføres af andre end Rigshospitalet – hvem betaler?):

Prøverør: **Blodprøve: 2 stk (4 mL) Li-heparin rør grøn4S (KLM130)).**

Husk at vende rørene med blod nogle gange!

Spinalprøve (CSV): 1 polypropylen plasticrør (PP) (f.eks. Sarstedt rør 60.540.012 eller 62.9924.284, Bie & Berntsen 15PPB (Barloworld Scientific)) med mindst 2 ml spinalvæske. NB: samme rørtype som til Alzheimers diagnostik på SSI.

Husk ingen blod i spinalprøven!

Prøveaflevering:

Prøver og følgeseddel sendes **samlet** med RH transport til **Neuroimmunologisk Lab. Afsn. 6311**.
Prøver opbevares ved 4°C indtil afhentning.

Svarafgivelse:

Prøver analyseres generelt én gang om ugen og svar udsendes pr. brev til rekvirerende afdeling umiddelbart derefter. Resultatet indsættes endvidere i MS-databasen.

I visse tilfælde kan en prøve kræve omkørsel den følgende uge, på grund af svarusikkerhed eller påkrævet prøvefortynding, og derfor kan der i enkelte tilfælde gå op til tre uger før svar udsendes.

Dato for modtagelse af spinalprøver på Afsn. 6311:

Dato for modtagelse af plasmaprøve på Afsn. 6311:

Tidspunkt for nedfrysning af spinal til -80°C:

Tidspunkt for nedfrysning af plasma til -80°C:

Analysedato:

Prøvenr.: